



## Disinfettante Detergente multiuso idroalcolico pronto all'uso per superfici battericida e fungicida

LINEA AMBIENTI

- Rapida ed efficace azione battericida e fungicida
- Disinfetta e sanifica tutte le superfici lavabili.
- Non intacca i metalli e lascia le superfici brillanti

### PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO N°18898



#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disinfettante multiuso idroalcolico per superfici a rapida azione ed evaporazione, battericida e fungicida.

#### APPLICAZIONE

Bromospray è indicato per una rapida disinfezione di tutte le superfici lavabili, materiali, attrezzature e strumentario in genere. Il formato da 750 ml è adatto per il settore alimentare, ospedaliero, dentistico, comunità, industrie alimentari, cucine. Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP).



#### MODALITA' D'USO E DILUIZIONE

Distribuire il prodotto tal quale uniformemente sull'area da trattare, quindi lasciare agire per 5 minuti per ottenere un'attività battericida e per 15 minuti per un'azione fungicida. Non occorre risciacquo.

Igienizzante/Detergente: dosare 30-50 ml di prodotto per litro d'acqua. Non occorre risciacquo. Non mescolare con altri detergenti o tensioattivi anionici. Conservare il recipiente ben chiuso nella confezione originale; Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

#### COMPOSIZIONE



100 g di prodotto contengono: didecildimetilammonio cloruro 0,3 g, alcool isopropilico 30 g, glicole propilenico 2 g, antiossidante 1 g, coformulanti e acqua demineralizzata q.b. a 100g.  
Presidio Medico Chirurgico - Registrazione n° 18898 del Ministero della Salute.

Titolare Registrazione: **Icefor S.p.A. Corso Cavalotti, 30-28100 Novara (NO)**

Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni riguardo allo stoccaggio e alla manutenzione del prodotto.

## PROPRIETA'

Bromospray è indicato per assicurare una profonda igiene, ovunque occorra garantire ambienti perfettamente sanificati e disinfettati. Esercita una efficace azione battericida nei confronti di *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Enterococcus hirae* ATCC 10541, *Escherichia coli* ATCC 10536 e *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442 alla concentrazione tal quale dopo 5 minuti di contatto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13697. Risulta fungicida riguardo a *Candida albicans* ATCC 10231 e *Aspergillus niger* ATCC 16404 alla concentrazione tal quale dopo un tempo di contatto di 15 minuti come da norma UNI EN 13697. Bromospray è stato inoltre testato su legionella (Metodo UNI EN 1276:2009/EC 1:2011) e su listeria (Metodo UNI EN 13697:2015) con risultati di attività positiva. Grazie al contenuto di uno speciale agente antiossidante non intacca le superfici metalliche. La sua neutralità lo rende idoneo su qualsiasi tipo di materiale accentuandone la brillantezza finale.

## INFORMAZIONI CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Liquido incolore
PROFUMO	Alcolico
PH TAL QUALE	6 - 8
PH DILUITO (1% acqua)	
PESO SPECIFICO	970 ± 10 g/L

## PACKAGING

CODICE PRODOTTO	15168	15124
CODICE EAN	8017841151695	8017841151251
CODICE ITF	08017841151688	08017841151244
CONFEZIONI	Flacone 750 ml x 12 pz	Tanica 5 L x 4 pz

### NOTE:

Ogni confezione da 750 ml contiene n.3 nebulizzatori.

REV. MARZO 2020-Annulla e sostituisce la revisione precedente

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO  
9001 CERTIFICATO

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO  
14001 CERTIFICATO

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE DELLA SALUTE E  
SICUREZZA DEI LAVORATORI BS  
OHSAS 18001 CERTIFICATO



**Icefor Spa** - Via Pablo Picasso,16 - 20013 Magenta (Mi)  
Tel. +39 02.97.92.401 - Fax +39 02.97.93.751 - [www.iceforprofessional.com](http://www.iceforprofessional.com)